

Ce préservatif vous est offert par / INPES, Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ; Ministère chargé de la Santé.

Contributors

France. Ministère de la santé
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (France)

Publication/Creation

[between 2010 and 2014?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/my7wc5gn>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Attention : ce préservatif est fabriqué en latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques. L'utilisation d'un préservatif ne peut garantir une protection à 100 % contre la grossesse ou les maladies sexuellement transmissibles.


PHICOGIS EUROPE S.A.R.L.
15B, rue de l'Industrie
67400 ILLKIRCH - FRANCE



largeur
54
mm



Ce préservatif vous est offert par :

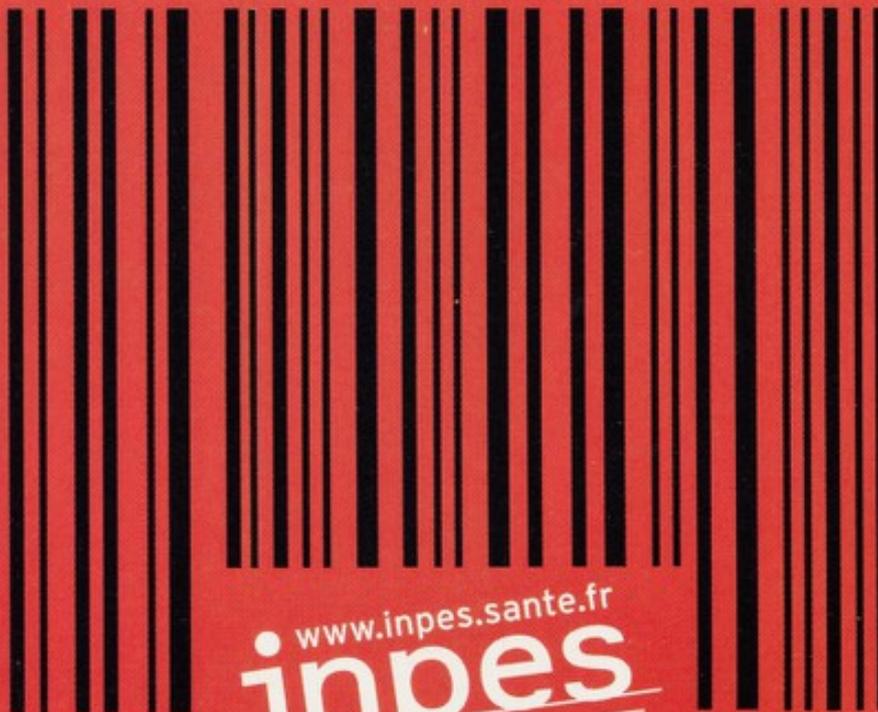

www.phicogiseurope.fr

www.inpes.sante.fr
inpes

Ce préservatif vous est offert par :

www.inpes.sante.fr
inpes
Institut national
de prévention et
d'éducation pour
la santé



Sida Info Service

0 800 840 800

(numéro vert 24h/24 et 7j/7)

www.sida-info-service.org

Phicogis

1 Préservatif JACKET®XL54 NATURAL - Lubrifié, avec réservoir. ISO 4074 : 2002

A conserver dans un endroit frais et sec, à l'intérieur de son emballage.

JACKET® est une marque déposée appartenant à Libertas. Tous droits réservés.

07/2018



130901

LOT

Ne pas jeter sur la voie publique.

1 préservatif fin Jacket XL54

CE
0123

Préservatif masculin lubrifié à usage unique - conforme à la norme (NF EN ISO 4074)
latex de caoutchouc naturel - couleur naturelle - surface lisse - avec réservoir
Largeur nominale : 54 mm

Distribué par PHICOGIS EUROPE - 67400 Illkirch - Tél. 03 88 36 40 03



Mode d'emploi : 1. Ouvrez délicatement l'emballage. Attention aux coups d'angles, de dents et d'objets coupants qui pourraient le déchirer. 2. Le préservatif doit être placé sur le pénis en érection avant tout contact entre les organes génitaux car une goutte de liquide séminal ou de sperme peut être libérée avant l'éjaculation. Pincez le réservoir au bout du préservatif pour en chasser l'air. 3. Déroulez le préservatif aussi loin que possible sur le sexe. Surtout, si vous rencontrez une résistance, ne forcez pas : vous l'avez peut-être posé à l'envers. Jetez-le et prenez-en un autre. 4. Avant la fin de l'érection, retirez-vous juste après l'éjaculation en retenant le préservatif à la base du sexe. 5. Jetez le préservatif usagé à la poubelle après l'avoir noué. Ne réutilisez jamais le préservatif. Pour chaque rapport, utilisez un nouveau préservatif.

Pour chaque rapport, utilisez un nouveau préservatif

En cas de rupture, contactez le plus rapidement possible
Sida Info Service : 0800 840 800 qui vous indiquera
le lieu de prise en charge des accidents post-exposition
le plus proche de chez vous.

Conseils d'utilisation : le préservatif permet de se prémunir efficacement des infections sexuellement transmissibles. C'est aussi une méthode de contraception. Avant l'usage, lisez attentivement les conseils d'utilisation. Un préservatif ne s'utilise qu'une seule fois. Ce préservatif est fabriqué en latex (caoutchouc naturel). Certaines personnes peuvent y être allergiques. Dans ce cas, consultez un médecin avant tout nouvel emploi. Vérifiez toujours auprès de votre pharmacien que tous les produits (médicaments ou autres) susceptibles d'entrer en contact avec le préservatif sont compatibles avec le latex. Si la lubrification est insuffisante, utilisez un lubrifiant supplémentaire à base d'eau. Ne pas utiliser comme lubrifiant des produits gras comme l'huile, le beurre, la vaseline, la crème pour le corps ou les produits solaires..., car ils endommagent le latex.

STOCKER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC,
A L'ABRIS DE LA LUMIÈRE DIRECTE, DU SOLEIL ET DE L'OZONE