

J' [erect penis with condom graphic] à Paris / Mairie de Paris.

Contributors

Paris (France). Mairie

Publication/Creation

[between 2012 and 2014?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/hg87nhpy>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

GRATUIT

CONCEPTION GRAPHIQUE : SÉBASTIEN SOUYRI / LAURÉAT DU CONCOURS PARIS CAPOTES CRÉATION

3 CONSULTATIONS DE DÉPISTAGE ANONYME ET GRATUIT (CDAG) DE LA MAIRIE DE PARIS

CDAG Figuier / 2 rue du Figuier (4^e) / Tel : 01 49 96 62 70

CDAG Ridder / 3 rue du Ridder (14^e) / Tel : 01 58 14 30 30

CDAG Belleville / 218 rue de Belleville (20^e) / Tel : 01 40 33 52 00



Sau les Services
0 800 848 880
www.sau-les-services.fr



TOUTE L'INFO
au 3975* et
sur PARIS.FR
* hors appel d'urgence 112

Numéro de lot et date de validité sur l'enveloppe des produits, mode d'emploi à l'intérieur,
conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'ozone.

MAIRIE DE PARIS 

J' à PARIS



 Lot n° : HBM1321

 Validité : 11/2018

1 préservatif fin Jacket XL 54 + 1 Gel



Préservatif masculin lubrifié à usage unique - conforme à la norme (NF EN ISO 4074)

latex de caoutchouc naturel - couleur naturelle - surface lisse - avec réservoir

Largeur nominale : 54 mm

Distribué par PHICOGIS EUROPE - 67400 Illkirch - Tél. 03 88 36 40 03



Mode d'emploi : 1. Ouvrez délicatement l'emballage. Attention aux coups d'ongles, de dents et d'objets coupants qui pourraient le déchirer. 2. Le préservatif doit être placé sur le pénis en érection avant tout contact entre les organes génitaux car une goutte de liquide séminal ou de sperme peut être libérée avant l'éjaculation. Pincez le réservoir au bout du préservatif pour en chasser l'air. 3. Déroulez le préservatif aussi loin que possible sur le sexe. Surtout, si vous rencontrez une résistance, ne forcez pas : vous l'avez peut-être posé à l'envers. Jetez-le et prenez-en un autre. 4. Avant la fin de l'érection, retirez-vous juste après l'éjaculation en retenant le préservatif à la base du sexe. 5. Jetez le préservatif usagé à la poubelle après l'avoir noué. Ne réutilisez jamais le préservatif. Pour chaque rapport, utilisez un nouveau préservatif.

Pour chaque rapport, utilisez un nouveau préservatif

En cas de rupture, contactez le plus rapidement possible

Sida Info Service : 0800 840 800 qui vous indiquera le lieu de prise en charge des accidents post-exposition le plus proche de chez vous.

Conseils d'utilisation : le préservatif permet de se prémunir efficacement des infections sexuellement transmissibles. C'est aussi une méthode de contraception. Avant l'usage, lisez attentivement les conseils d'utilisation. Un préservatif ne s'utilise qu'une seule fois. Ce préservatif est fabriqué en latex (caoutchouc naturel). Certaines personnes peuvent y être allergiques. Dans ce cas, consultez un médecin avant tout nouvel emploi. Vérifiez toujours auprès de votre pharmacien que tous les produits (médicaments ou autres) susceptibles d'entrer en contact avec le préservatif sont compatibles avec le latex. Si la lubrification est insuffisante, utilisez un lubrifiant supplémentaire à base d'eau. Ne pas utiliser comme lubrifiant des produits gras comme l'huile, le beurre, la vaseline, la crème pour le corps ou les produits solaires..., car ils endommagent le latex.

STOCKER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC,
A L'ABRIS DE LA LUMIÈRE DIRECTE, DU SOLEIL ET DE L'OZONE

Numéro de lot et date limite d'utilisation inscrits sur l'emballage du préservatif.