

Durex easy-on Pleasuremax : 1 préservatif pour une stimulation maximale des 2 partenaires / SSL Healthcare France, SSL International plc, Manchester.

Contributors

SSL Healthcare France
SSL International.

Publication/Creation

[2012?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/y3agb28e>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

10059719

La nouvelle Forme profilée des préservatifs Durex
Si ce préservatif est utilisé correctement pour un rapport vaginal,
il a plus de risques d'être abîmé ou de glisser. Aucune méthode
de contraception ne peut garantir une protection efficace à 100%
contre la grossesse, le virus VIH (SIDA) ou les infections
sexuellement transmissibles. À conserver dans un endroit frais et
sec à l'abri de la lumière directe et de l'ozone. Un préservatif
ne s'utilise qu'une seule fois. Lire attentivement la notice
d'utilisation à l'intérieur. Préservatif en latex de caoutchouc naturel.
testé électriquement à 100%.

Echantillon gratuit, ne peut être vendu.

Lire attentivement la notice à l'intérieur.

* Date limite et numéro de lot inscrits sur l'enveloppe du préservatif.

easy-on*
Facile à utiliser et plus confortable



pleasuremax

Un maximum
de plaisir à deux...
microperlé pour elle,
nervuré pour lui!

pleasuremax

1 préservatif pour
une stimulation maximale
des 2 partenaires

à découvrir :



Préservatif profilé, transparent, perlé et nervuré, avec
réservoir et fabriqué en latex de caoutchouc naturel
avec un lubrifiant non spermicide.
Exp.: Diamètre moyen : 56 mm.
2017-01 0010641359
SSL International plc, Manchester, M41 7HA, UK



CE 0120

ISO 4074: 2002

Durex, la marque leader de préservatifs plébiscitée dans le monde entier par des millions d'hommes et de femmes

Ne jamais utiliser de lubrifiant à base d'huile tel que la vaseline, beurre, huiles et crèmes de soin. Si la lubrification est insuffisante, utiliser un lubrifiant à base d'eau compatible avec le latex des préservatifs tels que Sensilube ou Durex Play. S'il y a un risque que vous ou votre partenaire soyez enceinte suite à un oubli ou à une erreur d'utilisation d'un moyen de contraception, consulter un médecin immédiatement.

Certaines personnes peuvent être sensibles au latex. Dans ce cas, nous vous conseillons d'utiliser Durex Avanti qui est un préservatif sans latex.

Certains produits (médicaments ou autres) peuvent altérer l'efficacité du préservatif. Avant utilisation, toujours vérifier leur compatibilité auprès de votre pharmacien ou médecin. Aucune méthode de contraception ne peut garantir une protection efficace à 100% contre la grossesse, le virus VIH (SIDA) ou les infections sexuellement transmissibles.

A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'ozone. A utiliser avec précaution, le préservatif peut être endommagé par les ongles abîmés et les objets coupants tels que bijoux ou fermeture éclair.

CONSEILS D'UTILISATION



Mettre le préservatif quand le pénis est entièrement en érection et avant tout contact entre le pénis et le corps du partenaire. Le liquide émis pendant les préliminaires sexuels provoquant l'érection peut contenir des spermatozoïdes et des germes contaminants.



Ouvrir délicatement l'emballage en le déchirant sur un côté. S'assurer que le préservatif à l'intérieur ne sera pas endommagé.



L'air resté à l'intérieur du préservatif peut provoquer sa rupture. Veiller donc à saisir soigneusement entre les doigts le haut du préservatif (le réservoir), afin de chasser l'air. Placer le préservatif sur le bout du sexe en érection.



En maintenant toujours le réservoir entre les doigts, utiliser l'autre main pour continuer à dérouler complètement le préservatif le long du pénis. S'assurer que le préservatif reste en place pendant l'acte ; s'il s'enroule sur lui-même, le remettre en place immédiatement en le déroulant à nouveau avant de continuer la relation sexuelle.



Se retirer après l'éjaculation et avant la fin de l'érection, tout en le retenant à la base du sexe. Attendre de s'être complètement retiré avant d'enlever le préservatif. Veiller encore à éviter tout contact du pénis et du préservatif usagé avec le corps du partenaire.



Jeter le préservatif de façon hygiénique : le rouler dans un papier et le mettre à la poubelle. Ne pas le jeter dans les toilettes.

UN PRÉSERVATIF NE S'UTILISE QU'UNE SEULE FOIS

Préservatif en caoutchouc naturel de latex. Un préservatif lubrifié* avec réservoir.

*Lubrifiant non spermicide à base silicone

Durex Avanti, Comfort XL, Performa, Jeans, Elite, Feeling Gossamer Extra, Excite, Tropical, Natural, Contour, Play, Sensilube, Mix, Pleasuremax, Clin, Love, Sensation, Fiesta Mix et le sceau de qualité Durex sont des marques du groupe SSL.

Découvrez
toutes
nos nouveautés
sur
www.durex.fr

Rev 01

SSL Healthcare France :
23, allées de l'Europe - 92588 Clichy Cedex

SSL International plc, Manchester, M41 7HA, UK